

# MASQUES A USAGE MEDICAL DIT « MASQUE CHIRURGICAL » A USAGE UNIQUE.

## Informations destinées aux utilisateurs

Les masques à usage médical sont principalement destinés à protéger contre la transmission d'agents infectieux et, dans certaines circonstances, à protéger la personne qui les porte contre les projections de liquides susceptibles d'être contaminés. Les masques à usage médical peuvent également être portés par des personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans un contexte d'épidémie ou de pandémie.

Les masques à usage médical de type I sont conformes à la norme NF EN 14683 d'août 2019.

Toute manipulation d'un masque doit être encadrée par des gestes d'hygiène des mains.

Ces masques sont constitués de plusieurs éléments qui ont une fonction précise :

- un écran organisé en plusieurs couches (appelées parfois plis), dont l'interne et l'externe sont en non tissé, une couche intermédiaire, ou média filtrant, assure la fonction de filtration,
- la barrette nasale : elle permet d'ajuster le masque à la forme du nez, d'éviter aussi les fuites et de réduire la formation de buée sur les lunettes,
- les liens ou les fixations auriculaires : qui permettent la fixation des masques au visage.


### Bon à savoir :

Les masques à usage médical ont un « sens » à respecter lors de la mise en place :

- il convient de présenter à l'extérieur la mention imprimée sur le masque.
- en l'absence d'indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus rembourré de la barrette.

### Important :

Le port de ces masques ne doit pas dépasser la durée maximale de temps correspondant à leur efficacité, dans la limite de l'acceptabilité et de l'intégrité du masque durant leur activité professionnelle (à changer toutes les 4 heures selon les préconisations du fabricant).

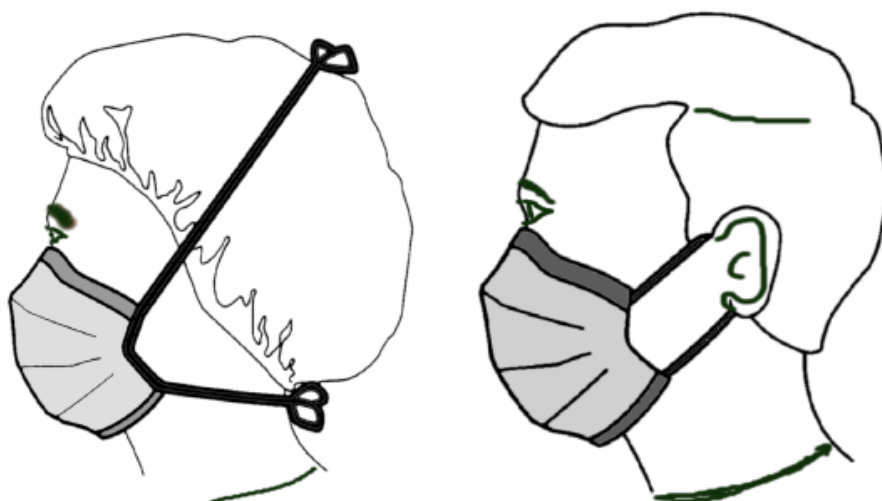

Bonnes modalités d'attache des liens

## Règles du port du masque à usage médical



Friction des mains par **solution hydroalcoolique** ou lavage à l'eau et au savon.



Prenez le masque, **le bord rigide vers le haut et marque ou face colorée à l'extérieur**. Placez-le sur le visage en le tenant par les **lacets supérieurs**.



Nouez les lacets supérieurs **sur le haut de la tête**, puis nouez les lacets inférieurs **au niveau de la nuque**. Ne pas tenir compte de cette étape si le masque à élastique.



Pincez le haut du masque sur la **racine du nez**.



Abaissez **le bas du masque** sous le menton.



À partir de cet instant, ne portez plus les mains sur votre masque. Changez-le **après quatre heures** ou **dès qu'il est mouillé**.



Avant retrait du masque, friction des mains par **solution hydroalcoolique** ou lavage à l'eau et au savon.



Ôtez le masque en veillant à **ne toucher que les lacets/élastiques**. Détachez ceux du bas, puis ceux du haut.



Jetez le masque **dans une poubelle munie d'un sac-poubelle et d'un couvercle**, puis lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.